



法氏囊抗原金标检测卡

鸡传染性法氏囊病抗原快速检测试纸条使用说明书

本产品能检测鸡传染性法氏囊病（IBD）病毒，用于鸡传染性法氏囊病（早期感染、亚临床感染、混合感染等）的快速检测。

【试剂盒组成】

- | | | | |
|----------------------|---------|--------|----|
| 1. 鸡传染性法氏囊病抗原快速检测试纸条 | 20套/40套 | 2. 说明书 | 1份 |
| 3. 一次性手套 | 4双/8双 | | |

【操作方法】

- 采样** 取出待检鸡的法氏囊，置于某容器内，加五倍体积左右的生理盐水或干净自来水，充分剪碎或匀浆，静置5分钟。
- 检测** 从4℃冰箱取出试纸，恢复到室温；手拿试纸的手柄端，将测试端插入组织悬液的上层澄清液中（勿使液面超过 MAX 线），NC 膜（位于测试端和手柄端之间的白色部分为 NC 膜）吸满液体时，取出试纸平放1~5分钟，观察试纸 NC 膜的显色情况。

【结果判定】

- 阴性**：若质控线显色，但检测线不显色，判为阴性，即该鸡未感染 IBD 病毒（如图一）；
- 阳性**：若质控线与检测线都显色，判为阳性，即该鸡感染 IBD 病毒（如图二）；
- 无效**：若质控线不显色，则结果无效，请重新测试（如图三）。

【注意事项】

- 一条试纸只能用一次，请在有效期内使用；
- 试纸切忌受潮；
- 检测时试纸 NC 膜没有出现任何棕红色线，表明操作有误或试纸失效；



广州健仑生物科技有限公司

电话: 020-82574011 手机 1: 13802429590 邮箱: Service@jianlun.com
传真: 020-28216107 手机 2: 13710007117 网址: www.jianlun.com

4. 当检测结果为阳性时, 用过的试纸、器械及被检囊液样品应做消毒处理;
5. 雏鸡用中等毒力偏强的疫苗免疫后一周内, 检测结果为阳性时应考虑疫苗毒的干扰。

【储存及有效期】

保存于干燥阴凉处 (4~30℃), 有效期为 18 个月, 生产日期见包装。

【公司名称】 广州健仑生物科技有限公司

【联系电话】 13802525278 13710007117 020-82574011

【公司传真】 020-28216107

【电子邮件】 Service@jianlun.com

【腾讯 QQ】 712628580 712628581 712628582

【公司网址】 www.jianlun.com

【公司地址】 广州市天河区车陂第十五工业园一幢 4067 室